

TRAVEL CHECK – AUTOMATSKU ZGLOBNI SFIGMOMANOMETAR UPUTSTVO za upotrebu

Pravilna upotreba sfigmomanometra dopušta vam da pratite stalno vas krvni pritisak, ali koji mora biti izmeren na ispravnom mestu po savetu lekara. Preporučujemo vam da redovno posećujete vašeg lekara radi opšte zdravstvene kontrole i radi detaljnijih informacija u vezi krvnog pritiska.

Čestitamo vam na kupovini novog TRAVEL CHECK merača. Ovaj skroz automatski, zglobno postavljen merač krvnog pritiska je u isto vreme lak za upotrebu i pogodan za dnevna merenja. Unapređene i potpune mogućnosti učiniće da **TRAVEL CHECK** bude jedini merač krvnog pritiska koji vam je potreban.

Sa ovim meračem krvnog pritiska, možete sačuvati 60 merenja u Zoni memorije, i idealan je za korisnike koji žele da merač i izmerene vrednosti budu pouzdani. Ovaj merač je čvrst i prenosiv, i pogodan je kako za kućnu upotrebu tako i za putovanja. Merenje krvnog pritiska je određeno prema merama napravljenim po mišljenju stručnjaka, po kojima se koristi manžetna/stetoskop auskultaciona metoda, bez propisanih ograničenja prema:

-Internacionalnom protokolu (ESH potvrda),

-Asocijaciji za unapređenje medicinskih instrumenata (AAMI potvrda) / EN 1060-4.

UPOZORENJE: Savetujte se sa pratećim dokumentom. Molimo vas da čuvate na sigurnom ovaj vodič.

GARANCIJA

TRAVEL CHECK je pokriven garancijom u slučaju fabričkih oštećenja na materijalu ili prilikom izrade. Garancija je na 5 godina. Neispravni delovi će biti zamenjeni besplatno jedino ako uređajem nije rukovala neobučena osoba i ako je uputstvo za upotrebu savesno praćeno. Bilo kakva neovlašćena rukovanja/opravke od strane neovlašćenog servisa će odmah poništiti validnost garancije.

BRZO UPUTSTVO (slike na str.20 Originalnog uputstva)

A. Instalirajte baterije, -Tip baterija: AAA 2 baterije.

B. Postavite manžetnu -Namestite manžetnu na levi zglob šake sa dlanom prema gore.

C. Ispravno nameštanje -Stavite vaš lakat na ravnu površinu tako da vaš ručni zglob bude u istoj visini sa vašim srcem.

D. Pritisnite dugme -držite ga pritisnuto za vreme merenja.

E. Automatska memorija -Simbol "M" će trepereti kad se merenje završi i sačuvaće ga u memoriji.

F. Pozivanje memorije -Koristite dugme za uključivanje da izaberete memorijsku zonu, zatim pritisnite M dugme da pronađete važno merenje u memorijskoj zoni.

PREDHODNA OBJAŠNENJA

Automatski merač pritiska zadovoljava Evropske regulative i odnosi se na CE oznaku "CE 0068".

Kvalitet uređaja je ispitan i potvrđen od direktive 93/42/EEC.

EN 1060-1: 1995/A1: 2002 Bezopasni sfigmomanometri – Deo 1 Opšti propisi

EN 1060-3: 1997/A1: 2005 Bezopasni sfigmomanometri- Deo 2 Dodatni propisi za sisteme za elektromehaničko merenje krvnog pritiska

EN 1060-4: 2004 Bezopasni sfigmomanometri – Deo 4 Test procedure za određivanje celokupnog sistema ispravnosti automatskih bezopasnih sfigmomanometara.

Da bi obezbedili stalnu ispravnost, preporučujemo vam da sva digitalna merenja krvnog pritiska ponovo podesite. Ovaj monitor ne zahteva ponovno podešavanje za 2 godine kod normalnog korišćenja prosečno 3 puta na dan ili dok vaš monitor ne pokaže simbol CA. Uređaj će takođe biti ponovo podešen ako monitor podnese oštećenja nastala neposrednom silom (kao što je ispuštanje) ili izlaganje uređaja tečnostima i /ili ekstremnoj toploti ili hladnoći/ vlažnosti.

Kada se pojavi CA, jednostavno se vratite kod najbližeg prodavca da vam opet podesi aparat.

KAKO OVAJ UREĐAJ RADI

TRAVEL CHECK koristi oscilometrijski metod za merenje vašeg krvnog pritiska. Pre nego što manžetna počne da se napumpava, uređaj će utvrditi osnovni pritisak u manžetni, koji je isti sa atmosferskim pritiskom. Napumpana manžetna će blokirati protok krvi u arteriji. Za vreme ispuštanja ručne manžetne, monitor će registrovati oscilacije pritiska registrovane kao pulsacije otkucaj-otkucaj. Svako pomeranje za vreme perioda merenja će izazvati grešku u merenju. Posle detektovanja amplitude i pada oscilacije pritiska za vreme procesa ispuštanja, vaš TRAVEL CHECK će odrediti vaš sistolni i dijastolni pritisak, i vaša brzina pulsa će biti registrovana u isto vreme.

O KRVNOM PRITISKU

Šta je krvni pritisak?

Krvni pritisak je snažan pritisak na zid arterije dok krv protiče kroz arterije. Izmereni pritisak kada se srce kontrahuje i šalje krv iz srca je sistolni (viši) krvni pritisak. Izmereni pritisak kada se srce širi za krv koja se vraća u njega se zove dijastolni (niži) krvni pritisak.

Zašto merite vaš krvni pritisak?

Između različitih zdravstvenih problema koji svladavaju modernog čoveka, problemi povezani sa visokim krvnim pritiskom su daleko od najbanalnijih. Opasnost visokog krvnog pritiska je u jakoj vezi sa kardiovaskularnim bolestima i visoko oboljevanje čini neophodnim merenje krvnog pritiska kako bi se otkrili rizici.

Varijacije krvnog pritiska

Krvni pritisak varira sve vreme! Ne treba uvek da se brinete ako naiđete na dva ili tri merenja na visokom novou. Krvni pritisak se menja tokom meseca ili čak tokom dana. On takođe varira i sezonski kao i na promenu temperature. (vidite sliku na strani 22. Originalnog uputstva)

IME/FUNKCIJA SVAKOG DELA UREĐAJA (slika na strani 23. Originalnog uputstva)

- LCD displej,
- dugme za uključivanje/isključivanje/start,
- dugme za uključivanje/isključivanje memorijske zone
- poklopac baterije
- ručna manžetna
- dugme za memoriju,
- povezivač adaptera sa podacima

BATERIJE: 2 A AA veličine, 1.5V alkalne

TUMAČENJE DISPLEJA

DISPLEJ: (vidite sliku na strani 24. Originalnog uputstva)

- pokazivač datuma/vremena (u gornjem levom uglu)
- memorijska zona 1 (pokazuje se kada je u funkciji)
- memorijska zona 2 (pokazuje se kada je u funkciji)
- AVG memorijski prosek
- tri srca –detektor nepravilnosti srčanog rada (pokazuje se kada uređaj detektuje nepravilni srčani rad)
- pravougaonik – pokazatelj baterije: prazan pravougaonik pokazuje praznu bateriju i pokazuje se na monitoru kada treba zameniti bateriju; pravougaonik sa crticama u sebi pokazuje punu bateriju.
- broj memorijske senkvence
- sa desne strane gore je sistolni pritisak a sa desne strane dole je dijastolni pritisak
- EE – greška u merenju : budite sigurni da je L-sonda bezbedno povezujete čašicu za vazduh i ponovite merenje. Ako je greška još uvek prikazuje, vratite uređaj kod vašeg distributera ili se javite servis centru za pomoć.
- E1 - budite sigurni da je L-sonda bezbedno povezujete čašicu za vazduh i ponovite merenje. Ako se greška još uvek prikazuje, vratite uređaj lokalnom distributeru ili kontaktirajte servis.
- E2 – prevelik pritisak 300mmHg: Isključite uređaj i ponovite merenje. Ako se greška opet pojavljuje, vratite uređaj lokalnom distributeru ili servis centru.
- E3 – greška u podacima: otklonite baterije, sačekajte 60 sekundi, i ponovo učitati program. Ako se greška još uvek pojavljuje, vratite uređaj lokalnom distributeru ili servis centru.
- Er – preveliki doseg merenja: ponovite opet merenje. Ako se greška još uvek pojavljuje, vratite uređaj lokalnom distributeru ili servis centru.
- CA – indikator podešavanja: pojavljuje se kada monitor zahteva ponovno podešavanje. Preporučujemo ponovno podešavanje.

INDIKATOR NEPRAVILNOSTI SRČANOG RADA (slika na str.25 Originalnog uputstva)

Ovaj uređaj ima pokazivač nepravilnosti srčanog rada.

Kada izvršite očitavanje, uređaj će izmeriti frekvenciju srčanog rada, i ako odredi da su okucaji veći ili manji od normalne frekvencije, simbol će se pojaviti na displeju.

Ako se taj simbol redvno pojavljuje, predlažemo vam da kontaktirate vašeg lekara. Nepravilni otkucaju srca mogu biti brožčani faktor koji jedino vaš doktor može pravilno protumačiti.

Beleška: preporučujemo vam da kontaktirate vašeg tehničara ako se često pojavljuje ovaj pokazatelj. On nije dovoljan za dijagnozu ali upotpunjuje podatke.

INSTALACIJA BATERIJA (slika na strani 24. Originalnog uputstva)

1. Postavite palac na poklopac za baterije i gurnite ga nadesno kako bi ga otvorili
2. Prvo stavite donju bateriju. Baterije su tipa LR03 "AAA" 2 alkalne baterije.
3. Stavite drugu bateriju.

- 4.Zatvorite poklopac stavljajući ga u ležište dela za baterije. Gurnite prema drugom kraju kako bi kompletno zatvorili poklopac. Klik na drugom kraju će označiti da je poklopac zatvoren.
- 5.Budite sigurni da je poklopac za baterije dobro postavljen posle zamene baterija i pre svakog merenja.
- 6.Kada su baterije otklonjene, sva funkcije će se izbrisati sem merenja u memoriji.

Neophodno je da zamenite baterije kada:

- 1.kada se ikona za praznu bateriju pokazuje na displeju,
- 2.kada je pritisnuto dugme ON/OFF/START a ništa se ne prikazuje na displeju. Menjajte obe baterije istovremeno. Otklonite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vreme.

UPOZORENJE

Za uputstva za postavljanje baterija pogledajte deo na kraju ovog Uputstva o upotrebi

Ovi delovi ne mogu se servisirati. Baterije ili oštećenja uređaja prouzrokovana njima ne podležu pod garanciju.

Koristite samo originalne baterije. Uvek menjajte sve baterije zajedno. Koristite baterije istog proizvođača kao i sam merač i iste vrste. Druge vrste baterija mogu izazvati eksplozije i požar.

Baterije mogu eksplodirati ako se nepažljivo rukuje njima. Nikada nemojte puniti, otklanjati ili držati baterije blizu izvora toplote. Nemojte ih spaljivati. Ne preporučuju se punjive baterije.

POSTAVLJANJE MANŽETNE (slike na str.26 Originalnog uputstva).

- 1.Skinite sat, nakit i sl. pre postavljanja manžetne na ručni zglob. Obmotajte narukvicu i manžetna će se uviti preko nepokrivene kože radi ispravnog merenja.
- 2.Stavite narukvicu na levi zglob ručja ako je moguće, sa dlanom okrenutim nagore.
- 3.Budite sigurni da je ivica manžetne postavljena na oko 1cm od dlana.
- 4.Da bi osigurali tačnost merenja, čvrsto obmotajte narukvicu oko vašeg zgloba tako da nema slobodnog prostora između zgloba i manžetne. Ako manžetna nije postavljena dovoljno čvrsto, izmerena vrednost može biti pogrešna.

ISPRAVNA POZICIJA ZA MERENJE

- 1.Stavite vaš lakat na sto tako da je manžetna u isto nivou kao i vaše srce.
- 2.Okrenite vaš dlan naviše.
- 3.Sednite udobno na stolicu, i udahnite duboko 5-6 puta.

KORISNE INFORMACIJE

- Nemojte meriti vas krvni pritisak odmah nakog obilnog obroka.
- Kako bi ispravno očitali pritisak, molimo vas da sačekate jedan sat nakon obroka pa onda izmerite pritisak.
- Nemojte pušiti ili uzimati alkohol pre merenja pritiska.
- Ne bi trebalo da budete umorni ili iscrpljeni dok obavljate merenje.
- Veoma je važno da se opustite tokom merenja.
- Nemojte meriti pritisak ako ste pod stresom ili ste napeti
- Sačekajte oko 3 minuta pre nego što obavite sledeće merenje.
- Merite pritisak u tihom prostoriji.
- Nemojte se pomerati ili pričati dok obavljate merenje.

PROCEDURA MERENJA (slika na str. 28 Originalnog uputstva)

Uređaj ima dva memorijska dela koji vam omogućavaju da čuvate dve grupe merenja. Te grupe mogu sadržati merenja dva različita korisnika ili za istog korisnika ali za dva različita merenja (npr. jutarnja i večernja merenja)

- 1.Pritisnite dugme za memorijsku zonu da bi izabrali zonu 1 ili 2
 - 2.Stavite manžetnu na ručni zglob. Pritisnite ON/OFF/START dugme. Dok se ne pojavi simbol CA, svi simboli će se osvetliti, proveriće se funkcije displeja, isključujući memorijsku zonu koja nije izabrana. Funkcije proveravanja će se obaviti za oko 2 sekunde.
 - 3.Posle pojavljivanja svih simbola na displeju, pojaviće se svetleće "O". Monitor je "spreman za merenje" i automatski će početi da se polako napumpava manžetna i počeće merenje.
 - 4.Kada je merenje završeno, sistolni pritisak, dijastolni pritisak i puls će se naizmenično pojavljivati na LCD ekranu. Merenje će se onda automatski memorisati u zoni koja je predhodno izabrana.
- Ovaj uređaj će se ponovo automatski napumpavati na 220mmHg ako sistem detektuje da je izmeren veći pritisak od onog koji potreban vašem organizmu.

Beleška:

- 1.Merenje treba obaviti u tihom sobi.
- 2.Monitor će se automatski isključiti otprilike 1 minuta nakon poslednje operacije.

3. Ako je za vreme merenja pritisnuto jedno od dugmeta ispod displeja, manžetna će se odmah ispumpati i merenje će biti zaustavljeno.

4. Molimo vas da pratite sledeća uputstva u vezi funkcije memorije.

PONOVNA UPOTREBA MEMORIJE (slika na str.29 Originalnog uputstva)

1. Uređaj ima dve memorijske zone (1 i 2). Svaka zona može sačuvati 60 merenja.

2. Da bi čitali vrednosti iz izabrane memorijske zone, koristite dugme za uključivanje memorijske zone kako bi selektovali memorijsku zonu (1 ili 2) iz koje želite da pročitate izmerene vrednosti. Zatim pritisnite dugme "M" i vrednost će se pokazati na displeju sa dodeljenim memorijskim brojem.

3. Uređaj će prvo pokazati vrednost poslednjeg merenja. Svaki novi pritisak na M dugme prikazivaće po jedno sačuvano merenje. Poslednje merenje će se pojaviti prvo. Izmereni vrednosti će se pokazati za maksimalno 3 merenja.

BRISANJE VREDNOSTI IZ MEMORIJE:

1. Pritisnite dugme da izaberete memorijsku zonu 1 ili 2.

2. Držite M dugme za oko 5 sekundi i snimljeni podaci u predhodno izabranoj zoni memorije će biti izbrisani. Pritisnite M dugme 5 sekundi.

PODEŠAVANJE VREMENA

1. Da bi podesili datum/vreme na monitoru, pritisnite taster "L u dva kružića". Na displeju će se pokazati trepćući broj koji označava mesec.

2. Da bi podesili mesec pritisnite taster "+". Svaki pritisak će povećavati broj za jedan u cikličnom manevru.

3. Pritisnite taster "L u dva kružića" ponovo da bi potvrdili ulaz, i pojavice se trepćući broj koji označava dan. Promenite dan, sat i minut kao što je opisano u tački 2. korišćenjem dugmeta da promenite i dugmeta da potvrdite unos.

4. Kada se pojavi "O" na monitoru znači da je uređaj opet spreman za merenje.

PRENOS INFORMACIJA NA KOMPJUTER

DATACHECK paket se prodaje odvojeno od sfigmomanometra i sadrži softver za CD ROM, USB konektor i ručni vodič. DATACHECK omogućava da prenesete očitavanje pritiska sa sfigmomanometra na vas kompjuter i da ih analizirate sa dodatkom za analizu. takođe možete slati očitavanja na udaljeni kompjuter, kao što je kompjuter vašeg lekara. Sve što vam treba možete preuzeti sa softvera i pratite DATACHECK instrukcije.

Beleška: softver se ne koristi za dijagnostikovanje.

GREŠKE U MERENJU

Ako se pojavi bilo kakva greška za vreme upotrebe, molimo vas da proverite sledeće tačke.

SIMPTOMI	KONTROLA	ISPRAVKA
Nema slike na ekranu kada je pritisnuto dugme ON/OFF/START.	Da li baterije dobro rade?	Zamenite ih sa novim alkalnim baterijama.
	Da li su baterije postavljene na pogrešan način?	Postavite baterije ponovo na ispravan način.
EE znak se pokazuje na displeju ili je prikazani izmereni pritisak ekstremno nizak (visok)	Da li je manžetna pravilno postavljena?	Obmotajte manžetnu tako da bude ispravno postavljena.
	Da li ste razgovarali ili se pomerili?	Izmerite opet stojeći mirno. Držite lakat čvrsto za vreme merenja.
	Da li je manžetna pomerana za vreme merenja?	

Beleška:

1. Ako uređaj još uvek ne radi, vratite ga vašem prodavcu. U takvim okolnostima nemojte demontirati uređaj i nemojte ga sami popravljati.

2. Za vodič o greškama koje se pojavljuju na displeju vidite objašnjenja u odeljku Tumačenje displeja

UPOZORENJE

1. Proverite da li je uređaj neoštećen pre upotrebe.

2. Uređaj sadrži visoko osetljive delove. Zato izbegavajte ekstremne temperature, vlagu i direktnu sunčevu svetlost. Izbegavajte ispuštanje ili trešenje glavnog uređaja, i zaštitite ga od prašine.

3. Čistite monitor merača pritiska i manžetnu pažljivo sa blago navlaženom, mekanom krpom. Ne pritiskajte. Nemojte prati manžetnu ili je čistiti hemijskim supstancama. Nikada ne koristite razređivač, alkohol ili benzin za čišćenje.

4. Prolivene baterije mogu oštetiti uređaj. Otklonite baterije kada uređaj ne koristite na duže vreme.

5. Uređaj nije za dečju upotrebu tako da izbegavajte opasne situacije.
6. Nemojte demontirati uređaj ili manžetnu.
7. Ako je uređaj čuvan blizu frižidera, vratite ga na sobnu temperaturu pre korišćenja.
8. Ovaj uređaj nije pokriven servisom. Ne smete koristiti bilo kakve alatke da otvorite uređaj niti da podešavate bilo šta unutar uređaja. Ako imate bilo kakvih problema, molimo vas da kontaktirate prodavca ili doktora od koga ste kupili uređaj.
9. Kod korisnika kod kojih je dijagnostikovana aritmija (pretkomorni ili komorni prevremeni puls ili pretkomorna fibrilacija), dijabetes, oskudna cirkulacija krvi, problemi sa bubrezima, ili korisnika koji boluju od udara ili korisnike koji su bez svesti, uređaj, kao što su svi automatski merači krvnog pritiska, može teško odrediti ispravan krvni pritisak. Takvi korisnici treba da konsultuju redovno svog lekara.
10. Kod dijabetičara sa opštom arteriosklerozom oscilometrijska merenja mogu biti negativno pomenjena zbog otvrdnjavanja arterija. U takvim slučajevima, auskultaciona metoda je mnogo preciznija.
11. Da bi zaustavili merenje u bilo kom vremenu, pritisnite jedno dugme ispod displeja. Manžetna će se brzo ispumpati.
12. Jednom kada napumpavanje dostigne 300mmHg, uređaj će početi ispumpavanje naglo iz bezbedonosnih razloga.
13. Molimo vas da zapamtite da je ovo uređaj samo za kućnu upotrebu i ne može se koristiti umesto pravih medicinskih profesionalnih merača.
14. Ovaj uređaj se ne koristi za dijagnozu ili tretman bilo kakvih zdravstvenih problema ili bolesti. Izmereni rezultati su samo za upoređivanje. Konsultujte vašeg lekara za tumačenje izmerenog pritiska. Kontaktirajte vašeg doktora ako sumnjate da imate neki medicinski problem. Nemojte menjati vasu terapiju pre nego se konsultujete sa lekarom.
15. Nemojte koristiti merač krvnog pritiska blizu jakog električnog polja, kao što je mobilni telefon, mikrotalasna pećnica, X-zraci itd.
16. Uređaj nije podesan za pacijente mlađe od 12 godina.
17. Izbegavajte da prekidate merenje, preporučujemo vam da uvek imate pune baterije kod sebe ili strujni adapter.
18. Kaiš uređaja za merenje krvnog pritiska se ne preporučuje za starije pacijente ili za pacijente sa arteriosklerozom ili koji imaju abnormalni ili smanjen protok krvi.

SPECIFIČAN OPIS

Izvor struje: 3V dve LR03 (AAA) alkalne baterije.

Metod merenja: oscilometrijski.

Opseg merenja: pritisak 30-260 mmHg; puls 40-199 otkucaja/minut.

Tačnost: pritisak ± 3 mmHg; puls ± 5 mmHg.

Senzor pritiska: polu vodeći.

Napumpavanje: vodeća pumpa.

Ispumpavanje: automatska valvula oslobođenog pritiska

Kapacitet memorije: 60 merenja za svaku zonu pojedinačno.

Automatsko isključivanje: 1 minut nakon poslednje upotrebe.

Radni uslovi: 10-40°C (50-104°F); 40%-85% RH max.

Uslovi za čuvanje: -10°C - 60°C (14-140°F); 10%-90% RH max.

Težina: 145g (w/o baterije).

Obim ruke: 13,5-22 cm (5,3"-8,7").

Ograničenje korisnika: odrasli korisnici.

Dimenzije: 92 (L) x 70 (W) x 38 (H) mm.

CE 0068 : u saglasnosti sa 93/42/CE.

Simbol "lik čoveka u kvadratu": Tip BF uređaja i manžetne su dizajnirani da unaprede bezbednost od električnog udara.

IPX0: originalno pakovanje (otvoreno pakovanje ne štiti od ulaska vode)

NO AP/APG: ovaj uređaj ne sme biti korišćen u uslovima mešavine zapaljivih anestetika i vazduha ili kiseonika ili azot-oksida

*Specifične osobine su promenljive bez zapisa.

PATENT

Pantetirani uređaj: 295-11-738,9 ZL 95217421,9 Patenti u drugim zemljama nisu konačni.

Ovaj proizvod je uskladu sa EU direktivom 2002/96/EC

Znak sa precrtanom kantom za smeće označava da ovaj proizvod, na kraju svoje upotrebe, mora biti odložen odvojeno od domaćeg smeća. Možete ga odneti do posebnog mesta za elektronski i električni otpad ili ga vratiti prodavcu kada budete kupovali sličan uređaj. Korisnik je dužan da odloži ovaj uređaj na posebno mesto za ovakvu vrstu otpada. Ukoliko se proizvod nakon upotrebe odloži kao posebna vrsta otpada, moguće je reciklirati ga, tretirati i ukloniti ekološki čime se izbegava negativan uticaj kako na okolinu tako i na zdravlje i doprinosi reciklaži materijala ovog proizvoda. Za dalje informacije u vezi sa dostupnim mestima za uklanjanje ovakvog otpada, kontaktirajte lokalnu agenciju za uklanjanje otpada ili prodavnicu gde ste kupili ovaj uređaj.

Usklađenost sa EU direktivom 2006/66/EC.

Znak sa precrtanom kantom za smeće na bateriji ili na pakovanju ukazuje da kada su baterija prazne, one se moraju odložiti odvojeno od domaćeg smeća i odneti na reciklažu ili kod prodavca prilikom kupovine novih baterija.. Simboli Hg, Cd ili Pb ispod ovog znaka ukazuju na vrstu hemikalije koja se nalazi u bateriji: Hg = živa, Cd = kadmijum, Pb = olovo. Korisnik je dužan da prazne baterije odloži na odgovarajući način kako bi one bile ispravno tretirane i reciklirane. Pravilno odlaganje praznih baterija za dalju reciklažu, tretiranje i ekološko uklanjanje pomaže u zaštiti životne sredine i zdravlja i pomaže da se recikliraju hemikalije koje se nalaze u baterijama. Nepravilno uklanjanje baterija od strane korisnika šteti životnoj sredini i ljudskom zdravlju. Za detaljnije informacije u vezi sa sistemima za skupljanje otpada, kontaktirajte lokalni centar za uklanjanje otpada ili prodavnicu gde ste kupili ovaj proizvod.

Beleška:

- 1.Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa svim primenjivim standardima i u skladu je sa svim zahtevima koji se odnose na zaštitu u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću (EMC). Međutim, potrebno je preduzeti neke mere predostrožnosti u vezi sa EMC-om i ovaj uređaj ne sme biti instaliran niti upotrebljavan u skladu sa EMC informacijama u ovom uputstvu.
- 2.Pokretna i mobilna oprema za radio komunikaciju može uticati na rad elektromagnetnog uređaja. Ukoliko dođe do elektromagnetnih ometanja, ponovite merenje temperature ako su vrednosti nesigurne.

Uputstvo za deklaraciju proizvođača – elektromagnetne emisije		
TRAVEL CHECK napravljen je da radi u dolnavedenom elektromagnetnom okruženju. Osobe koje koriste ovaj merač moraju osigurati njegovu upotrebu u ovom okruženju.		
Test emisije	Usklađenost	Elektromagnetno okruženje - uputstvo
RF emisije	Grupa 1	TRAVEL CHECK koristi isključivo RF energiju za svoje interne funkcije. Stoga, njegove RF emisije su vrlo niske i vrlo je mala verovatnoća da će prouzrokovati bilo kakve smetnje u radu elektronske opreme u okruženju.
RF emisije	Klasa B	TRAVEL CHECK podesan je za upotrebu u svim prostorijama, uključujući kućnu upotrebu i prostorije koje su direktno povezane sa glavnim izvorom niskog napona za domaću upotrebu.