

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: HLADNI SPREJ 400ml

-momentalno dejstvo kod uganuća i modrica

UPOTREBA

Kod uganuća i modrice za intenzivno hladan osećaj koji dovodi do momentalnog otklanjanja bola.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Naprskajte povredu na razdaljini od 25cm i ne duže od 5 sekundi. Nemojte koristiti na oderotinama, otvorenim ranama i sluzokožama.

-može izazvati hladne opekotine ako ga prskate suviše blizu i suviše dugo.

UPOZORENJE

-ambalaža pod pritiskom. Držite ga dalje od direktne sunčeve svetlosti i nemojte ga izlaga ti temperaturi preko 50°C. Nemojte bušiti bocu ili je paliti, čak i kada je upotrebljena.

-nemojte prskati oko otvorene vatre ili užarenog materijala.

-držite ga dalje od izvora zapaljivosti. Nemojte pušiti.

-držite ga daleko od domašaja dece.