

UPUTSTVO ZA UPOTREBU TERMOGEL COMFORT 10x10cm
PAKOVANJE ZA VIŠESTRUKU UPOTREBU ZA TOPLU I HLADNU TERAPIJU

TermoGel koristi prirodnu terapeutsku moć toplote i hladnoće na jednostavan i udoban način. TermoGel se može višestruko upotrebljavati i on je adekvatna zamena za kese sa ledom i/ili flaše sa vrućom vodom.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

HLADNA TERAPIJA

Za male modrice i povrede (istegnuća mišića, iščašenja i deformacije), opekotine, glavobolje, zubobolje, mala krvavljenja, ograničenih upala kože. Takođe odgovara i kod opekotine od meduze, uboda insekata, opekotine od koprive i slično, i opekotine od sunca: tkivo kože se brzo hladi, smanjuje se protok krvi, sprečavajući na taj način raznošenje alergena kroz telo.

TOPLA TERAPIJA

Za lumbago, išijas, bolove mišića i stomaka (uključujući bol od lošeg varenja), ukočene zglobove i reumatske bolove.

NAČIN UPOTREBE

Sa svojom mekanom tkaninom, TermoGel može biti direktno primenjen na koži na predelu koji treba tretirati. Za hladnu terapiju stavite Termogel u frižider najmanje 2 sata; za toplu terapiju ostavite ga u vruću vodu (max.60°C) 10 minuta ili ga stavite u odgovarajuću posudu, prelijte ga vodom (max.300 ml) i u mikrotalasnu pećnicu 6 minuta (max.300 vati).

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pažljivo čitajte uputstvo. TermoGel se ne sme držati duže od 20 minuta. Pre ponovljenog tretmana sačekati 20 minuta pa tek onda ponovo tretirati isti deo tela. Paziti da se pakovanje ne ošteti i uveriti se da gel ne curi nigde: ako je pakovanje puklo otklonite gel u otpad ili toalet i recikirajte pakovanje sa drugim beskorisnim kućnim stvarima. Ne gutati sadržaj pakovanja.

Ne koristiti gel nakon isteka roka upotrebe (videti datum proizvodnje na pakovanju).

POTREBAN JE SAVET LEKARA ZA UPOTREBU GELA KOD:

- pacijenata sa problemima u cirkulaciji,
- u slučaju da nesrećno progutate gel,
- u slučaju da simptomi i dalje traju,
- u slučaju mnogo ozbiljnijih problema.

CE Artsana S.p.A., Grandate (CO)-IT